


SO FUNKTIONIERT DER **COVID-19 ANTIGEN** **TEST** VON GENRUI

1

Nimm alle Teile des Kits aus der Verpackung. Achte darauf, dass sie Raumtemperatur haben!

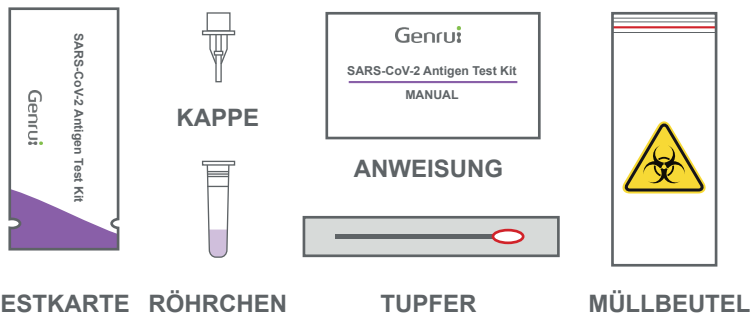


2

Stich mit der Spitze der Kappe die Folie des Röhrchens oben durch.

Ziehe die Kappe heraus.


Stecke das Röhrchen in das Loch oben auf der Box. Die Kappe kommt daneben.

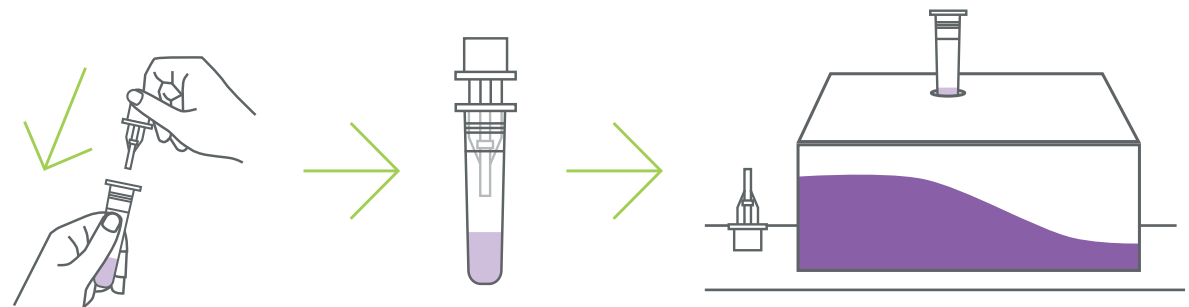

3

Der Test kann starten.

Nimm den Tupfer aus der Verpackung. Fass dabei die Spitze des Tupfers nicht an.

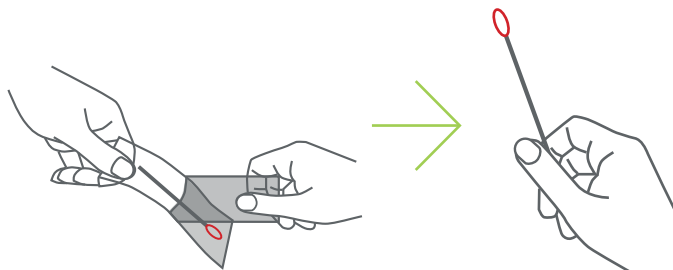


4

Führe den Tupfer zuerst 2cm ins linke Nasenloch. Pinsel die Innenseite 15 Sekunden / 5 Mal mit dem Tupfer aus. Wiederhole das ganze mit dem rechten Nasenloch.

Tupfer
2cm tief
einführen


5 x im
linken
Nasenloch
drehen

5 x im
rechten
Nasenloch
drehen

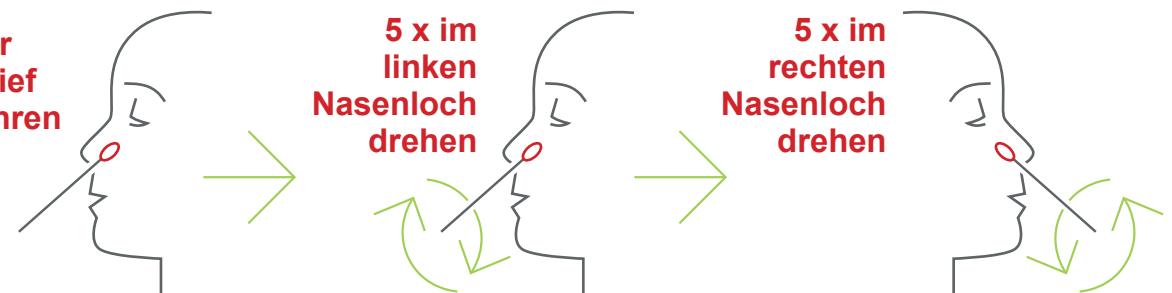


5

Stecke den Tupfer tief in das Röhrchen.

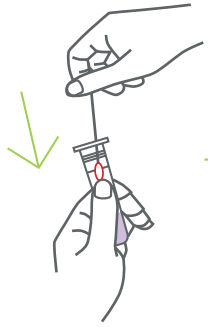


Drücke das Röhrchen unten kräftig und drehe dabei den Tupfer 6 Mal.

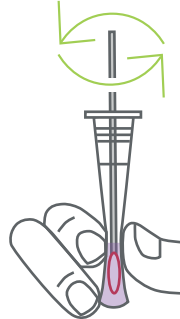

6 Mal drücken und drehen


Stecke das Röhrchen wieder in die Box.

warte 1 Minute!

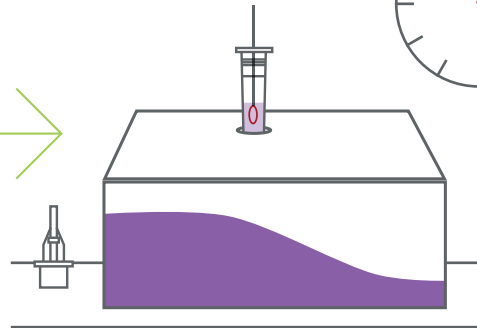


6

Drücke das Röhrchen und ziehe den Tupfer dabei heraus. Lege den Tupfer in den Müllbeutel aus dem Kit.

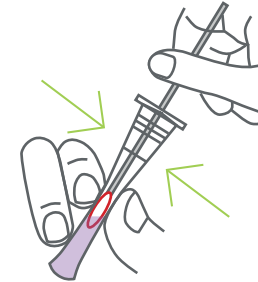


7

Drücke die Kappe bis zum Ende fest auf das Röhrchen.

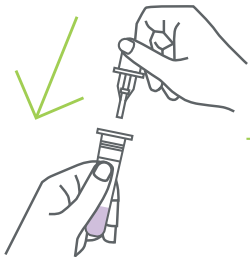

Jetzt 10 Mal schütteln!

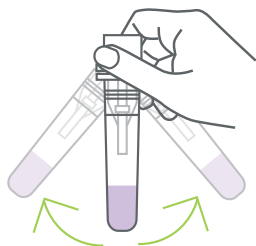

8


Nimm die Testkarte aus der Verpackung.



Lege die Testkarte flach auf den Tisch.




Ergebnis:

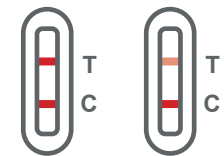

Positiv



Negativ

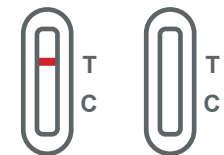

Ungültig

9

Ziehe den oberen Teil der Kappe ab.



Gib 3-4 Tröpfchen aus dem Röhrchen in das 1 Loch der Testkarte.



3 bis 4 Tropfen

Lege das Röhrchen in den Müllbeutel aus dem Kit.



10



Warte 15 Minuten!

