



**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie diesen Anleitungen zur Durchführung des nasopharyngealen (Nase-Rachen) Abstrichs folgen!  
Es empfiehlt sich, vorher zu schnäuzen!**




**1)** Stellen Sie ein Extraktionsröhrchen in die Arbeitsstation aus Karton. Geben Sie den gesamten der Einwegampulle (10 Tropfen der Pufferflasche) in das Extraktionsröhrchen.

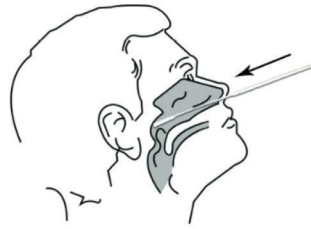


**2)** Neigen Sie den Kopf des Patienten / der Patientin leicht nach hinten. Halten Sie den Tupfer wie einen Stift und führen Sie ihn durch das Nasenloch parallel zum Gaumen ein.

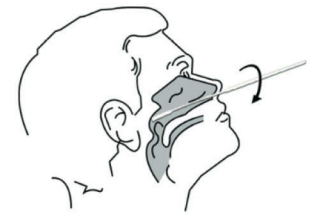

**3)** Während dem Einführen, reiben und rollen Sie den Tupfer vorsichtig ab. Sobald Sie den Rachenwiderstand spüren, hören Sie auf und lassen den Tupfer Sekret aufnehmen.

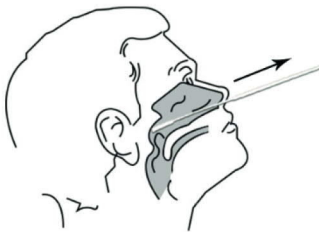


**4)** Entfernen Sie den Tupfer langsam und behutsam nach außen, während Sie ihn sanft zwischen den Fingern drehen.

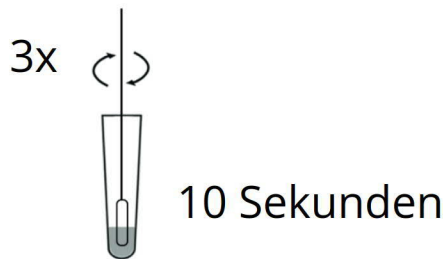


**5)** Führen Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen ein und tauchen Sie ihn auf und ab in die Flüssigkeit. Drehen Sie den Tupfer mindestens 3 Mal.



**6)** Entfernen Sie den Tupfer, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu extrahieren.

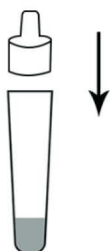

**7)** Drücken Sie die Düsenkappe fest auf das Extraktionsröhrchen und mischen Sie die Flüssigkeit gründlich.

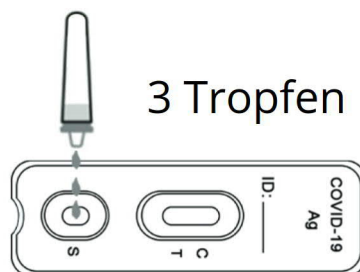


**8)** Geben Sie 3 Tropfen (ca. 100µL) mithilfe der Düsenkappe in die Probenvertiefung der Testkassette.



**9)** Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15 Minuten. Lesen Sie die Ergebnisse keinesfalls später als nach 20 Minuten ab.

**Auf der Rückseite finden Sie weitere Hinweise zum Ablesen des Ergebnisses.**

## So lesen Sie das Ergebnis ab - und interpretieren es:

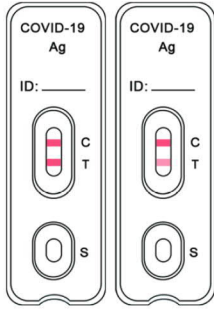

**POSITIV**

Zwei Farblinien erscheinen:

- eine Farblinie im Kontrollbereich (C)
- eine Farblinie im Testbereich (T)


Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Eine Ko-Infektion ist nicht ausgeschlossen.



**NEGATIV**

Eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint. Im Testbereich (T) ist keine Farblinie zu sehen.

Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekular-diagnostische Methoden bestätigt werden.

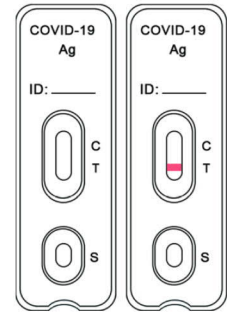


**UNGÜLTIG**

Keine Farblinie oder eine Farblinie im Testbereich (T) erscheint.

Das Testergebnis ist in beiden Fällen ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.


### Alternative Abstrich-Methoden:

#### Anterior nasale Abstrichmethode (Nase vorne)\*

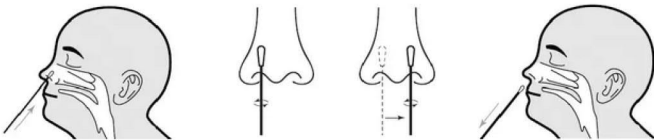

- 2) Führen Sie den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch des Patienten ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 cm tief vom Rand des Nasenloch eingeführt werden.
- 3) Tupfen Sie entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden.
- 4) Entfernen Sie den Tupfer, während Sie ihn sanft zwischen den Fingern drehen.

#### Oropharyngeale Abstrichmethode (Rachen)

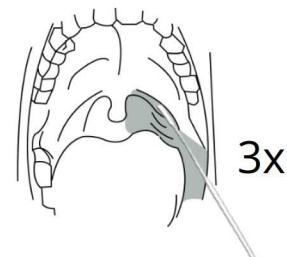

- 2) Lassen Sie den Patienten / die Patientin den Mund weit öffnen und "Ah" - Geräusche machen, wodurch die Rachenmandeln auf beiden Seiten freigelegt werden.
- 3) Halten Sie den Tupfer fest und wischen Sie an den Rachenmandeln auf beiden Seiten mindestens drei mal pro Seite mit mäßiger Kraft hin und her. Berühren Sie nicht Gaumen, Zunge, Zähne oder Zahnfleisch.

**Die korrekte Probenentnahme ist der wichtigste Schritt bei der Durchführung. Achten Sie darauf, ausreichend Sekret mit dem Abstrichtupfer aufzunehmen.**